

NÁVOD K POUŽITÍ: Duropont Opaker

Informace o materiálu a údaje o výrobci

Název, obchodní název	Duropont Opaker					<input checked="" type="checkbox"/> Medical Device
Klasifikace	Klasifikace:	Ila	Označování	CE		0483
Identifikace	Číslo položky:	F59, F60, F60P		UDI-DI:	763029670057P	
Varianty	Ředidlor 10ml, 30ml		Kapalinový opakér 10ml		Barvyn A1-D4 (VITA), G1-G4	
Povolené příslušenství	Schválené slitiny pro částečné protézy (kovové konstrukce) a krytí. Duropont Opaker, Duropont Silan (kovový prumer), protézové plasty pro překrytí					
Informace o výrobcin	SRN:		LI-MF-000000633			
	Adresat:	NOVODENT Ets., Industriestrasse 32, 9487 Bendern, Liechtenstein				
Obecná poznámka	Pouze pro odborný personál (zubní technici/zubaři). Dokumentovat název produktu a číslo šarže. Dodržovat pokyny v návodu k použití. Všechny závažné případy související s produktem je nutné hlásit výrobci a příslušnému orgánu členského státu.					
Účel použití	Pro zakrytí obkladů výjimatelných aparatur - příslušenství					
Indikace	Laminace kovových konstrukcí v protetice a plastové krytí - příslušenství					
Kontraindikace	Vyhněte se přímému kontaktu nepolymerizovaného materiálu v intraorální oblasti. Při přecitlivlosti pacienta na některou ze složek je třeba použití vynechat.					

Použití výrobku

Vlastnosti
Absolut lehká zpracovatelnost, vysoké mechanické hodnoty, absolutně barevně stálý, katalyzátorový systém bez nestálých terciárních aminů.

Prostředí použití	Trvanlivost a pokyny pro skladování
Použitelné při pokojové teplotě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení.	Vyhňte se přímému slunečnímu záření. Nádoby vždy uchovávejte uzavřené. Doba skladovatelnosti je 2 roky. Po uplynutí doby použitelnosti (Expiry date) produkt nepoužívejte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte při pokojové teplotě min. + 2°C, max. 25°C.
Složení materiálu:	
Kapalina:	Butanon, n-Butylacetát
Ochrana pokožky	Jednorázové rukavice z butylkaučuku, tloušťka vrstvy 0,7 mm, doba průniku (min) >480 Jednorázové rukavice z nitrilového kaučuku, tloušťka vrstvy 0,4 mm, doba průniku (min) >120 Přesná doba průniku je k dispozici u výrobce ochranných rukavic a musí být dodržena
Přeprava	Informace o přepravě suroviny naleznete v příslušných bezpečnostních listech.
Specifikace	Specifické produktové specifikace naleznete v příslušném technickém listu.

Upozornění na nebezpečí pro opaky a kovové primery

	Obsahuje kapaliny, butanon, n-butylacetát. Snadno vznětlivé. Bod vzplanutí +10 °C. Kapalina dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Možná senzibilizace při styku s kůží. Uchovávejte nádobu na dobře větraném místě. Uchovávejte mimo zdroje zapálení – nekuřte. Zcela vyprázdněné nádoby lze předat do místního materiálového cyklu. Zbytky je nutno likvidovat jako nebezpečný odpad v souladu s předpisy o nebezpečném odpadu. Přijměte opatření proti elektrostatickému náboji. Vyhněte se přímému kontaktu s kůží. Používejte ochranné rukavice ze speciálního nitrilu, manipulujte pouze pomocí špachtle, používejte odsávací zařízení, stejně jako ochranu dýchacích cest a pracovní brýle. Žádné systematické vedlejší účinky.

Návod k použití

Poměr směsís	Nepoužije set
Polymerizacen	Vzduchem schnoucí Doba 4 minutyn
Zpracováníg	<p>Níže uvedené údaje se vztahují na pokojovou teplotu 22 °C. Při nižší pokojové teplotě se časové údaje prodlužují a při vyšší pokojové teplotě se zkracují.</p> <p>Duropont Opaker a Duropont Silan: Normálně modelovaná kovová konstrukce musí být dostatečně opatřena retencemi a musí být na plochách pro nanášení drsná, tj. nesmí být ani pískovaná leskem, ani elektrolyticky leštěná. Hotový kovový primer Duropont Silan se má nanést tenkou vrstvou štětcem a zaschne přibližně za 3 minuty. Hotový, ihned použitelný opakér se před nanesením ve lahvičce protřepá. Lahvička se po použití musí ihned uzavřít, aby se zabránilo zhoustnutí. Opakér se nanáší tenkou a rovnoměrnou vrstvou na očištěnou a odmastenou kovovou konstrukci a zaschne přibližně za 4 minuty úplně. Použitý štětec by se měl po použití vyčistit ředidlem na opakér, aby mohl být znovu použit.</p>
Kombinacen	Produkt Duropont Opaker (příslušenství) lze kombinovat s Duropont Flash, Duropont, Duropont Silan, protézními plasty a lze jej použít na všechny slitiny, které jsou běžné a schválené pro obklad.















Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí, nepředstavují však záruku vlastností výrobku a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Produkt je obvykle dodáván stabilizovaný. Při výrazném překročení doby skladování a/nebo skladovací teploty však může za vzniku tepla polymerizovat. Za škody vzniklé nedodržením návodu k použití a oblasti použití není převzata žádná odpovědnost. Toto platí i v případě, že je produkt smíchán nebo společně zpracován s produkty konkurence.

Kontaktní údaje výrobces

Adresa:	NOVODENT Ets., Industriestrasse 32, 9487 Bendern, Liechtenstein				
Kontakt:	Tel.: +423 377 1500	Fax: +423 377 1509	E-Mail:	frontoffice@novodent.com	
Webové stránky:	Webový obchodp:	www.novodent.dental	Hlavní stránkae:	www.novodent.com	
Zpráva SSCTP	https://sscp.novodent.com/verblendkunststoffe.pdf				

Poznámka k symbolům ⓘ

	<input checked="" type="checkbox"/> Lot/Chargen Nr.		<input checked="" type="checkbox"/> Výrobce		<input checked="" type="checkbox"/> Unique Device Identification 
	<input checked="" type="checkbox"/> Datum spotřebym		<input checked="" type="checkbox"/> Teploty skladovánín		<input checked="" type="checkbox"/> Dodržujte návod k použitín
	<input checked="" type="checkbox"/> Číslo položkyr		<input type="checkbox"/> Ochrana před slunečním zářením		<input checked="" type="checkbox"/> Medical Device *
	<input checked="" type="checkbox"/> Pozorg (GHS)		<input checked="" type="checkbox"/> Nebezpečí Hořlavé (GHS)		<input checked="" type="checkbox"/> Nepoužívat znovun
SRN	<input checked="" type="checkbox"/> Single Registration Number (EUDAMED)				<input checked="" type="checkbox"/> MP-Evropská shoda *

ⓘ Symboly, které se používají na označení tohoto výrobku, jsou označeny symbolem označeno.

*Nepoužitelné u nemedicinských výrobků