



MODE D'EMPLOI: Seperator CC / Seperator HC

Informations sur les matériaux et données du fabricant

Nom, nom commercial	Seperator CC / Seperator HC					<input type="checkbox"/> Medical Device
Répartition	Classification:	-	Étiquetage:	None		<input checked="" type="checkbox"/> Technical Device
Data	Poudre.:	F73, F74		Basis UDI:	763029670073P, 763029670074P	
Variantes	Powder		Liquides			Couleurs
	-		100ml, 250ml, 500ml, 5.000ml			-
Accessoires autorisés	-					
Manufacturer data	SRN:		LI-MF-000000633			
	Adresse:		NOVODENT Ets., Industriestrasse 32, 9487 Bendorf, Liechtenstein			
Remarque générale	La contamination du fluide isolant par des résidus de plâtre, des pinceaux gainés de métal ou des matériaux similaires doit être évitée.					
Destination	Isolation des modèles en plâtre en ingénierie plastique.					
Indication	Convient pour isoler les modèles en plâtre en ingénierie plastique. Le film isolant garantit des surfaces lisses sur le plastique et assure une séparation sans faille entre le plastique et le plâtre ainsi qu'entre le plâtre et le plâtre.					
Contre-indication	Non adapté à une utilisation dans la bouche. Non approuvé en tant que dispositif médical.					

Application du produit

Propriétés	
Le séparateur forme une isolation très fine, lisse, précise et uniforme. Il garantit une séparation sans faille entre le plastique et le plâtre. Le séparateur peut être appliqué sur du plâtre froid ou chaud.	
Environnement d'utilisation	Conservation et conseils de stockage
Applicable à température ambiante.	Éviter la lumière directe du soleil. Gardez toujours les récipients fermés. La durée de conservation est de 2 ans. Ne pas utiliser le produit après la date de péremption. Tenir hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante min. + 2°C, max. 25°C
Composition du matériel	
Liquides: L'hydrogel d'alginate	
Protection cutanée	L'hydrogel d'alginate est doux pour la peau. Les personnes sensibles aux allergies aux ingrédients peuvent porter des gants en latex pour se protéger.
Transport	For regulations on the transport of the raw material, please refer to the Seperator CC / Seperator HC safety data sheets.
Spécifications	Pour les dispositions relatives au transport de la matière première, veuillez consulter la fiche de données de sécurité du Seperator CC / Seperator HC.
Notes réglementaires	-
Élimination selon les réglementations nationales.	

Instructions d'application

Traitement	<p>Préparation et utilisation Avant d'isoler, tous les modèles en plâtre secs doivent être soigneusement humidifiés (5 à 10 minutes). Cela empêche l'air de se piéger sous pression dans la pâte plastique molle pendant la polymérisation.</p> <p>Après que la cire a été éliminée, la quantité nécessaire de séparateur est placée dans un récipient et appliquée 1 à 2 fois sur la surface à isoler avec un pinceau propre. Le séparateur peut être lissé ou séché avec un léger courant d'air comprimé. Il est important de s'assurer qu'aucun fluide isolant ne reste dans les rainures et les dépressions et que aucun dentier en plastique ou agrafe ne rentre en contact avec l'isolant. Une fois que le film isolant est complètement sec, la pâte plastique peut être coulée immédiatement.</p>
-------------------	--















Avis de responsabilité

Les informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie des propriétés du produit et n'établissent pas de relation juridique contractuelle. Le produit est normalement livré stabilisé. Cependant, il peut polymériser sous le développement de chaleur si le temps de stockage et/ou la température de stockage sont significativement dépassés. Aucune responsabilité n'est acceptée pour les dommages résultant du non-respect des instructions d'utilisation et du domaine d'application. Ceci s'applique également si le produit est mélangé ou traité avec des produits concurrents.

Coordonnées du fabricant

Adresse:	NOVODENT Ets., Industriestrasse 32, 9487 Bendern, Liechtenstein				
Contact:	Phonel.:	+423 377 1500	Fax:	+423 377 1509	E-Mail: frontoffice@novodent.com
Websites::	Webshop:	www.novodent.dental		Main page:	www.novodent.com

Note sur les symboles ⓘ

	<input checked="" type="checkbox"/> Lot/Batch No.		<input checked="" type="checkbox"/> Fabricant		<input checked="" type="checkbox"/> Unique Device Identification 
	<input checked="" type="checkbox"/> Date d'expiration		<input checked="" type="checkbox"/> Températures de stockage		<input checked="" type="checkbox"/> Mode d'emploi respecter
	<input checked="" type="checkbox"/> Numéro d'article		<input type="checkbox"/> Protection contre le soleil		<input type="checkbox"/> Produit médical *
	<input type="checkbox"/> Attention (GHS)		<input type="checkbox"/> Risque Inflammable (GHS)		<input checked="" type="checkbox"/> Pas de produit médical
SRN	<input checked="" type="checkbox"/> Numéro d'enregistrement unique (EUDAMED)				<input checked="" type="checkbox"/> MP- European conformity *

ⓘ Les symboles utilisés sur l'étiquetage de ce produit sont marqués d'un astérisque ☒. *Non applicable aux produits non médicaux