



**INSTRUCCIONES DE USO: Seperator CC / Seperator HC****Información del Material y Datos del Fabricante**

Nombre,- Comercial	Seperator CC / Seperator HC					<input type="checkbox"/> Medical Device
Clasificación:	Clasificación:	-	Kennzeichnung	None		<input checked="" type="checkbox"/> Technical Device
Identifikation	INA:	F73, F74		Basis UDI:	763029670073P, 763029670074P	
Varianten	Polvo		Líquidos			Colores
	-		100ml, 250ml, 500ml, 5.000ml			-
AP (Accesorios Permitidos)	-					
Información del Fabricante	SRN:		LI-MF-000000633			
	Dirección:		NOVODENT Ets., Industriestrasse 32, 9487 Bendern, Liechtenstein			
Nota General	Se debe evitar la contaminación del líquido aislante con restos de yeso, pinceles con inserciones metálicas u otros materiales similares.					
Propósito	Aislamiento de modelos de yeso en tecnología de plásticos.					
Indicación	Adecuado para aislar modelos de yeso en tecnología de plásticos. La película aislante proporciona superficies lisas en el plástico y asegura una separación impecable entre plástico y yeso, así como entre yeso y yeso.					
Contraindicación	No apto para uso en la boca. No aprobado como dispositivo médico.					

Aplicación del Producto

Características
El separador forma un aislamiento muy delgado, liso, ajustado y uniforme. Garantiza una separación impecable entre plástico y yeso. El separador se puede aplicar sobre yeso frío o caliente.

Entorno de Uso		Durabilidad e Instrucciones de Almacenamiento
Bei Raumtemperatur Anwendbar.		Aplicable a temperatura ambiente. Evite la exposición directa al sol. Mantenga siempre el recipiente cerrado. La durabilidad es de 2 años. No use el producto después de la fecha de vencimiento. Mantenga fuera del alcance de los niños. Almacene a temperatura ambiente mínima de +2°C, máxima de 25°C.
Composición del Material:		
Líquido:	Hidrogel de alginato	
Protección de la Piel	El hidrogel de alginato es amigable con la piel. Las personas con sensibilidad alérgica a los ingredientes pueden usar guantes de látex para protegerse.	
Transporte	Consulte las regulaciones de transporte de la materia prima en las hojas de datos de seguridad de Seperator CC / Seperator HC.	
Especificaciones	No hay especificaciones de producto específicas para Seperator CC / Seperator HC.	

Indicaciones Regulatorias	-
Eliminación conforme a las regulaciones nacionales.	



Instrucciones de Uso

Procesamiento	<p><u>Preparación y Uso Antes de aislar</u> todos los modelos de yeso secos deben ser completamente humedecidos (5-10 minutos). Esto evita que durante la polimerización entre aire a presión en la masa de plástico blando.</p> <p>Después de derretir la cera, vierta la cantidad necesaria de separador en un recipiente y aplíquelo en la superficie a aislar una o dos veces con un pincel limpio. Con un ligero flujo de aire comprimido, el separador se puede alisar o secar. Es importante asegurarse de que no quede líquido aislante en las ranuras y depresiones, y que los dientes o los soportes de plástico no entren en contacto con el agente aislante. Una vez que la película aislante esté completamente seca, el plástico se puede verter de inmediato.</p>
----------------------	---

Nota de Responsabilidad

La información se basa en el conocimiento actual, pero no constituye una garantía de las propiedades del producto ni crea una relación contractual. El producto se suministra generalmente estabilizado. Sin embargo, puede polimerizar en caso de exceder significativamente el tiempo de almacenamiento y/o la temperatura de almacenamiento. No nos hacemos responsables de los daños derivados del incumplimiento de las instrucciones de uso y el área de aplicación. Esto también se aplica si el producto se mezcla o procesa junto con productos de la competencia.

Datos de Contacto del Fabricante

Dirección:	NOVODENT Ets., Industriestrasse 32, 9487 Bendern, Liechtenstein				
Contacto:	Tel.:	+423 377 1500	Fax:	+423 377 1509	E-Mail: frontoffice@novodent.com
Website:	Webshop:	www.novodent.dental		Main Web:	www.novodent.com

Nota sobre los Símbolos ⓘ

	<input checked="" type="checkbox"/> de Lote/Partida		<input checked="" type="checkbox"/> Fabricante		<input checked="" type="checkbox"/> Unique Device Identification
	<input checked="" type="checkbox"/> Vencimiento		<input checked="" type="checkbox"/> Almacenamiento		<input checked="" type="checkbox"/> Instrucciones de Uso
	<input checked="" type="checkbox"/> Número Artículo		<input type="checkbox"/> Protección Solar		<input type="checkbox"/> Medical Device *
	<input type="checkbox"/> Atención (GHS)		<input type="checkbox"/> Inflamable (GHS)		<input checked="" type="checkbox"/> No Medical Device
SRN	<input checked="" type="checkbox"/> Número de Registro Único (EUDAMED)				<input type="checkbox"/> MP- European Conformity *

ⓘ Símbolos utilizados en este producto en el etiquetado están marcados con ☒. *No aplicable a productos no médicos.